

Una Nueva Era en la Fotografía Dental

SMILE LITE MDP

MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY



A día de hoy, cada nuevo smartphone que llega al mercado está provisto de una cámara de fotos siempre más eficiente y sorprendente. Es para aprovechar esta revolución en curso que Smile Line os propone la primera instrumentación estudiada especialmente por la fotografía dental con vuestro smartphone.



Smile Line ☺
made in switzerland

SMILE LITE MDP

MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

La Smile Lite MDP es un dispositivo "plug and play", muy fácil de usar y que no necesita ninguna App particular, ningún procedimiento de calibración y ninguna formación específica. Os permitirá utilizar completamente todas las potencialidades de la cámara de vuestro smartphone, con toda sencillez.

Se convertirá rápidamente en un instrumento indispensable para Ustedes por:

- **Fotografías para la toma de color**
- **Comunicación diaria con el laboratorio**
- **Breves video clips**
- **Documentación de los pacientes**
- **Fotografías artísticas**



Smile Lite MDP,
art. nº 6600

La Smile Lite MDP puede ser considerada como un "mini estudio fotográfico".

La lámpara está provista de tres grupos de LEDs (light emitting diodes): cada grupo puede ser encendido individualmente y la intensidad de la luz puede ser también regulada (4 niveles de potencia).



Tres grupos de LEDs

Smile Lite MDP con los tres grupos de LEDs que pueden ser regulados individualmente.


El reverso de la Smile Lite MDP está provisto de un adaptador universal ajustable que permite insertar cada modelo de smartphone que tenga un ancho incluido entre 55 y 85mm.




Adaptador universal
ancho 55-85 mm

Smile Lite MDP con el adaptador universal que se ajusta a la mayoría de los smartphones.


Ejemplos de las increíbles posibilidades con Smile Lite MDP y un smartphone

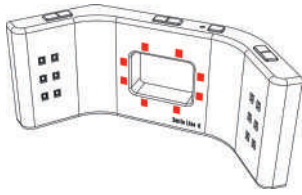


MDP con LEDs centrales a máxima potencia,
LEDs laterales apagados.
Con contrastador Flexipalette y retractor de labios.

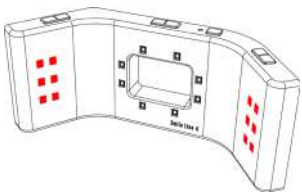


MDP con LEDs laterales a máxima potencia,
LEDs centrales apagados.
Con contrastador Flexipalette y retractor de labios.

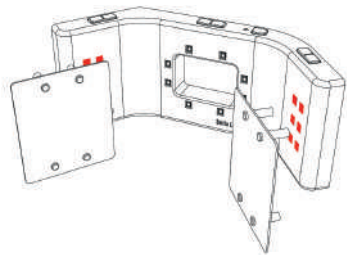

MDP con LEDs laterales a máxima potencia + difusores,
LEDs centrales apagados.
Con contrastador Flexipalette y retractor de labios.

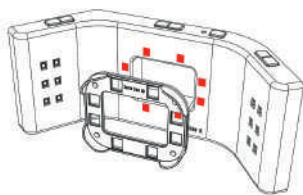

MDP con LEDs centrales a máxima potencia + filtro
polarizador, LEDs laterales apagados.
Con contrastador Flexipalette y retractor de labios.

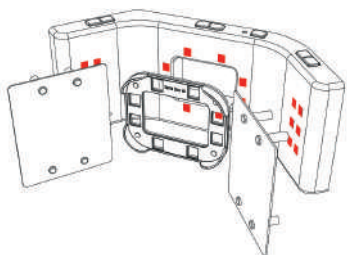

MDP con LEDs centrales a máxima potencia + filtro
polarizador, LEDs laterales a baja potencia + difusores.
Con contrastador Flexipalette y retractor de labios.



Las palabras del inventor de Smile Lite MDP: Prof. Louis Hardan



Estimados colegas, estimados amigos,

Después de 5 años de pruebas con el uso de Smartphones en el campo de la fotografía dental, he tenido la oportunidad de desarrollar Smile Lite MDP junto con el grupo de Styleitaliano y la compañía Suiza Smile Line SA.

Es para mí un honor y me llena de orgullo presentarles una herramienta que hemos desarrollado enfocada en un 100% a la fotografía dental con teléfonos móviles (MDP, por la sigla en Inglés de Mobile Dental Photography).

Smile Lite MDP es una revolución en la fotografía dental, debido a que su uso es extremadamente simple, que hace posible obtener resultados profesionales y siendo económicamente conveniente.

Si hacemos una comparación con la fotografía tradicional con una Réflex Digital (Single Lens Reflex), la Smile Lite MDP se podría describir como **un mini estudio fotográfico** que cubre la mayor parte de las necesidades del usuario para:

- **La luz de un ring flash**
- **La luz de un flash de puntos (dual)**
- **Fotografía con difusores**
- **Fotografía con un filtro polarizador**
- **Combinación de difusores y polarizador**
- **Videos breves**

En la página anterior, descubrirán algunos ejemplos de imágenes que destacan las increíbles posibilidades cuando se utiliza un smartphone con la Smile Lite MDP. Después de un muy corto período de pruebas y entrenamiento, usted también realizará tales imágenes altamente profesionales.

A día de hoy, en mi opinión, las fotografías dentales son obligatorias en cada clínica, para la comunicación con el paciente y el laboratorio y, por supuesto, ¡ para la documentación de sus propios pacientes! Smile Lite MDP alcanzó tal nivel de simplicidad que sería una lástima estar sin ella.

Los invito a ser curiosos, disfrutar jugando con luces y sombras y descubrir las posibilidades fenomenales de las cámaras de nuestro teléfonos modernos.

Deseándoles muchos éxitos con los primeros pasos con Smile Lite MDP!

Sinceramente,

Prof. Louis Hardan DDS, CES, DEA, PhD
Head Of Department Restorative and Esthetic Dentistry
Saint-Joseph University, Beirut

ACCESORIOS

Accesorios vivamente recomendados para una Smile Lite MDP
"opciones completas":

Difusores laterales (2 pzas)

Ideales para suavizar la luz y hacer la textura superficial más prominente.



art. n° 6610

Filtro polarizador (1 pza)

Elimina los reflejos de los dientes y permite determinar el valor de la selección de color. Ayuda también a ver las caracterizaciones bajo la capa del esmalte.



art. n° 6620

Smile Line ☺
made in switzerland

Smile Line SA
PO Box 229
CH-2610 St-Imier · Switzerland
mail@smileline.ch
www.smileline.ch

